



RACCORDEMENT ET UTILISATION DU MASQUE HAUTE CONCENTRATION MISE A JOUR SUITE A LA MISE EN PLACE DES BOUTEILLES AIR LIQUIDE OYAN

1. OUVRIR LA **PARTIE CENTRALE** DU SAC DE SECURITE
2. SORTIR UN **MASQUE HAUTE CONCENTRATION** (ADULTE ou ENFANT) ET LE DEBALLER
3. DEROULER LE TUYAU ET LE CONNECTER A LA PRISE OLIVE DE LA BOUTEILLE D'OXYGENE
4. REGLER LE DEBIT A **15 LITRES / MINUTE** AVEC LE SELECTEUR ROTATIF GRIS EN FACADE
5. **GONFLER LE SAC** EN APPUYANT AVEC L'INDEX SUR LA SOUPAPE VERTE SITUÉE A L'INTERIEUR DU MASQUE
6. POSITIONNER LE MASQUE SUR LA VICTIME EN ETANT ATTENTIF A SON BON POSITIONNEMENT



ATTENTION !

Vérifier que la victime ventile correctement (amplitude du mouvement de la cage thoracique)