

RACCORDEMENT ET UTILISATION DU BALLON AUTO-REMPLISSEUR A VALVE UNIDIRECTIONNELLE (B.A.V.U.) MISE A JOUR SUITE A LA MISE EN PLACE DES BOUTEILLES AIR LIQUIDE OYAN

1. OUVRIR LA PARTIE CENTRALE ET LA POCHES DROITE
DU SAC DE SECURITE



2. SORTIR UN B.A.V.U.
(ADULTE ou ENFANT) ET LE DEBALLER



3. DEPLOYER LE BALLON

4. DEROULER LE TUYAU ET LE CONNECTER
A LA PRISE OLIVE DE LA BOUTEILLE D'OXYGENE



5. REGLER LE DEBIT A 15 LITRES / MINUTE
AVEC LE SELECTEUR ROTATIF GRIS EN FACADE



6. VERIFIER LE BON GONFLAGE DU SAC ET POSITIONNER LE BAVU SUR LA VICTIME EN VEILLANT A LA
BONNE ETANCHEITE DU MASQUE (BON APPUI)

7. DEBUTER LA VENTILATION

ATTENTION !

VERIFIER QUE LES VOIES AERIENNES SONT BIEN DEGAGEES (DENTIER, CORPS ETRANGER...)
CONSERVER LA TETE BASCULEE EN ARRIERE EN HYPER-EXTENSION POUR UNE VENTILATION EFFICACE

SURVEILLER LES MOUVEMENTS DE LA CAGE THORACIQUE PENDANT L'INFLATION